

Inställningar i spirometriprogram

Följ alltid tillverkarens anvisningar då inställningar kan variera mellan olika program.

Generella inställningar oavsett spirometriprogram

Rekommenderat referensmaterial	Hedenström/Solymar (vuxen/barn <18 år).
Rekommenderade parametrar i undersökningsrapporten	FVC, FEV ₁ , FEV ₁ /FVC, SVC (eller VC), PEF*.
Återkopplingsfunktioner för utföraren såsom uppfyllande av ATS-kriterier och uppnådd platå vid utblåset	Kan variera mellan olika program (t.ex. ljudsignal eller färgstaplar). Dessa kan underlätta för utföraren och säkerställa kvalitén på undersökningen.
Granskning av spirometrikurvor	Kvalitetsgranskning förutsätter att du har tillgång till alla utförda kurvor utöver slutresultatet.

*PEF-värde som genereras av spirometrien kan med fördel användas vid bedömning av undersökningskvalitet men bör inte jämföras med PEF-värden som genereras från en PEF-mätare.

Inställningar i Cardio Perfect

Ställa in mätvärden spirometer:	<p>Gå in i Cardio Perfect:</p> <ul style="list-style-type: none"> # Arkiv (vänster högst upp i listan) # Inställningar # Spirometri # Parametrar <p>Spara endast mätvärdena FVC, FEV₁, FEV₁ %, SVC genom att bocka i kolumnerna mätvärden, sex parametrar och skrivare.</p> <p>Alla andra bockar klickas bort.</p> <p># OK (Viktigt! Annars sparas inte ändringarna)</p>
Granskning av spirometrikurvor:	<p>Gå in i Cardio Perfect:</p> <ul style="list-style-type: none"> # All efforts (höger högst upp i listan), välj "slutresultat" genom att klicka på pilen.
Då referenser saknas på gamla spirometrier:	<p>Gå in i Cardio Perfect:</p> <ul style="list-style-type: none"> # Format vänster (högst upp i listan) # Omberäkna referensvärde, välj "Hedenström/Solymar Com" # OK